

機械器具74 医薬品注入器  
JMDNコード: 44035000 容器アダプタ  
一般医療機器  
コレクション シリンジアダプタ

再使用禁止

\*【禁忌・禁止】

<使用方法>


- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、シリンジ内の体液・薬液を容器に注入する際、ポートに嵌合させるための器具である。

本品はエチレンオキサイド滅菌済みである。

<形状>

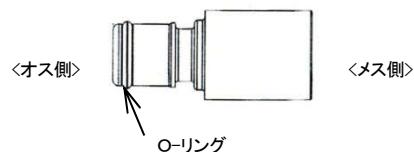

<原材料>本体:ポリスルフォン

\*【使用目的又は効果】

本品は、シリンジと容器の接続に使用するアダプタで両者の嵌合に用いる。

\*【使用方法等】

1. 本品は、包装開封後そのまま直ちに使用すること。
2. 容器に付いているキャップを外し、オス側部分を嵌合させる。嵌合部は手で触れない。
3. シリンジに付けていたキャップを外し、メス部分に嵌合させる。嵌合部は手で触れない。
4. シリンジから内容物を容器に注入する。
5. 注入が終了したら、アダプタを外し容器にキャップを施す。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 包装開封後、直ちに使用すること。
2. 使用中の嵌合緩みに注意すること。

\*【保管方法及び有効期間等】

1. 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。
2. 使用期限は包装に記載（自己認証による）。

\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

サイトリ・セラピューティクス株式会社  
〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番1号  
大手町パークビルディング  
電話番号:03-6860-5700

製造業者:

\*\*Cytori Therapeutics, Inc.  
米国

